



Invacare®

Softform Premier Active 2

Colchão 2 em 1 -
Estático e Dinâmico

Trusted Solutions,
Passionate People



O design único do colchão **Invacare Softform Premier Active 2** caracteriza-se pela inserção alternada de ar por debaixo de espuma recortada. O colchão mantém as mesmas propriedades do colchão estático **Invacare Softform Premier**, para prevenção de risco elevado de escaras, mas com a vantagem de se poder transformar em colchão dinâmico em caso de necessidade: um compressor discreto pode ser encaixado na entrada de ar, transformando o colchão numa superfície alternada fornecendo níveis adicionais de alívio da pressão. Não há necessidade de mover o utilizador, minimizando assim qualquer desconforto.

Indicado para utentes com muito elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão ou igual a 20+ na escala de Waterlow.



Colchão estático e dinâmico


A bolsa de ar alojada dentro do colchão **Softform Premier** pode ser ligada ao compressor para transformar o colchão estático num colchão dinâmico muito facilmente sem incomodar o utilizador e facilitando o trabalho do cuidador.

Compressor digital

As células de ar alternam num ciclo de 10 minutos graças ao compressor digital inovador, sem perturbar o utilizador aquando da mudança, oferecendo-lhe ainda maior conforto e minimizando o risco de aparecimento de úlceras de pressão.

Capa bi-elástica, permeável aos vapores

A capa do colchão tem muita elasticidade e adapta-se perfeitamente à espuma com recortes na superfície, minimizando desta forma fricções e aparecimento de úlceras.

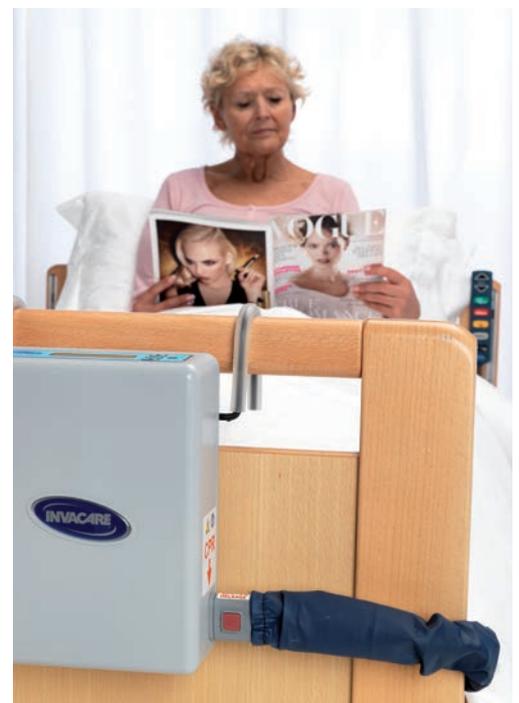

Características



Tubos de ligação da bolsa de ar interior, ao compressor alojados no fundo do colchão.



Ligação dos tubos ao compressor muito fácil



Ligação do compressor muito fácil - Simples botão On/Off. Mas nenhum ajuste é necessário.



Rapidamente o utilizador que está deitado numa superfície estática passa para uma superfície dinâmica.



Compressor inovador, digital, inclui ecrã LCD e alarme sonoro.



Software inteligente com ecrã LCD.



Quando está na função ativa, o desenho e construção única* das células de ar garantem que o utilizador fique completamente apoiado em toda a superfície do colchão. (*patente pendente)



Várias línguas disponíveis.



Em caso de furo, as células de ar podem ser facilmente substituídas.



O tubo do compressor está protegido o que ajuda na prevenção de infeções.



Os ganchos do compressor adaptam-se à maior parte das cabeceiras das camas.

Ilustração do compressor ligado à bolsa de ar inserida no meio de uma base de espuma de porte forte muito resistente 40 kg/m³ (para evitar deformidades) e de outra camada de espuma recortada para maior distribuição do peso do utilizador.



Camada de espuma superior recortada otimiza a distribuição do peso do utilizador e reduz as forças de pressão.



Capa azul, elástica, em Dartex permeável aos vapores e impermeável aos líquidos.



Em caso de corte de corrente o utilizador fica numa superfície estática indicada para a prevenção de aparecimento de úlceras mesmo para utilizadores de elevado risco.



A construção modular permite a substituição facilitada de algum dos componentes.

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura ¹	Comprimento ¹	Altura	Peso total	Peso max utilizador	Temperatura máxima de lavagem
Softform Premier Active 2	 830 - 900 mm (intervalos de 10 mm)	 1810 - 2100 mm (intervalos de 10 mm)	 152 mm	 14 kg	 247.6 kg	 80°

1. 1 medida standard disponível : 880mmx1970mmx152mm
(É favor consultar para outras medidas)

Compressor :

Nível de ruído : 32 Db
Ciclos de 10 minutos (1 em 2 ciclos)

Colchão produzido conforme :

Normas standards europeias : BS EN 597-1 Cig
Normas standards europeias : BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5

Cor da capa

Azul

